

Hygoclave 50 Serie – Kurzanleitung User Interface

Liste aller Sterilisationsprogramme



Liste aller Prüfprogramme



Einstellungen z. B.



- Benutzerverwaltung
- Sprache
- Drucker
- Wasserversorgung
- Servicebereich

Schnellzugriff auf das zuletzt verwendete Sterilisationsprogramm



Programmierung des Programmstarts

Verlängerung der Trocknungszeit

Programm starten

Home



Dokumentation und Geräteinformationen



- Speichern von PDF-Protokollen auf USB-Stick
- Etikettendruck
- Geräteinformationen (REF, SN, Montagedatum, Firmware-Version, ...)
- Touch-Display-Kalibrierung

Wenn der Zyklus läuft



Für manuellen Programmabbruch 3 sek  drücken

Zyklusfortschritt

Schnellzugriff auf das zuletzt verwendete Testprogramm



Wasserverwaltung



Starten und Stoppen der Wasserpumpe

Überwachung der Wasserqualität

- Gute Qualität
- Mittlere Qualität*
- Schlechte Qualität**

*Baldiger Austausch des Frischwassers empfohlen.
**Programmstart wird verhindert. Sofortiger Wasseraustausch erforderlich.